

NovaStar® TS NIV-Beatmungsмасke

Maximaler Tragekomfort und effektivere Abdichtung durch Silikon-Gel-Kissen und individuelle Anpassung an die Gesichtsförm.



P-2673-2008

Die NovaStar thermostabilen (TS) NIV-Gesichtsmasken wurden für die nicht-invasive Beatmungstherapie entworfen. Die Masken decken den Mund und die Nase ab und unterstützen somit eine effektive Therapie auch im Falle von Mundatmung.

Die NovaStar TS NIV-Gesichtsmasken sind nach dem in der Bedienungsanleitung aufgeführten Desinfektionsverfahren wiederverwendbar. Sie können mit heißem Dampf thermisch oder manuell-chemisch desinfiziert werden (siehe Gebrauchsanweisung zur Reinigung und Desinfektion).

Die Dräger-Größenschablone hilft bei der Auswahl der richtigen Maskengröße – unnötiges Öffnen der Maskenverpackung wird vermieden.

– NovaStar TS NIV-Masken sind die ersten Gesichtsmasken (Mund und Nase abdeckend) mit einem sehr weichen Silikon-Gel gefüllten Maskenkissen für die klinische Anwendung von Dräger.

– Der in dem flexiblen und weichen Maskenkörper eingebettete, biegsame Ring ermöglicht es, die Maske an die Gesichtskonturen des Patienten individuell anzupassen. Durch diese „maßgerechte Anpassung“ werden Undichtigkeiten minimiert und der Tragekomfort maximiert.

– Das Einstellrad ermöglicht eine stufenweise Anpassung der Stirnstütze, um die individuell bequemste Position zu finden. Das Stirnpolster stabilisiert die Maske; es ist biegsam und hat ein weiches Silikon-Gel gefülltes Kissen, um eine angenehme Anpassung an die Stirnform zu ermöglichen.

– Magnetische Clips sorgen für ein einfaches und patientschonendes Anlegen der NovaStar TS NIV-Gesichtsmasken. Im Notfall lassen sich die selbstausrichtenden Magnetverschlüsse schnell und sicher öffnen.

– Das 4-Punkte Kopfband mit zwei Velcro®-Befestigungen und zwei magnetischen Clips ist innerhalb des SE- bzw. AAV-Portfolios passend für alle Größen.



D-2300-2011

NovaStar® TS NIV-Gesichtsmaske mit Standard-Winkelstück



D-2301-2011

NovaStar® TS NIV-Gesichtsmaske mit Anti-Asphyxie-Ventil

NovaStar® TS SE (mit Standard-Winkelstück)

Das blaue Winkelstück zeigt an, dass die Maske weder ein Anti-Asphyxie-Ventil noch Ausatemöffnungen hat.



Bewegliche Stirnstütze und biegsames Stirnpolster sorgen für eine angenehme Anpassung an die Stirnform.

Individuelle Anpassung möglich durch einen in dem flexiblen und weichen Maskenkörper eingebetteten biegsamen Ring (vgl. Bilder unten). Nach Anpassung bleibt die Maske in Position.

Magnetische Clips zum Anbringen des Kopfbandes ermöglichen eine schnelle Positionierung und das Entfernen der Maske.

Ein um 360° bewegbares Standard-Winkelstück für mehr Flexibilität.

NovaStar® TS AAV (mit Anti-Asphyxie-Ventil)

Das weiße, transparente Winkelstück beinhaltet ein Anti-Asphyxie-Ventil, das den Zugang zur Raumluft im Falle von reduziertem Druck erlaubt. Die Ausatemöffnungen unterstützen die CO₂ Eliminierung während der nicht-invasiven Beatmung.



Einstellrad zur Anpassung der Stirnstütze.

Das Silikon-Gel gefüllte Kissen erlaubt einen hohen Komfort und eine effektive Abdichtung.

Ausatemöffnungen für CO₂ Eliminierung während der nicht-invasiven Beatmung.

Anti-Asphyxie-Ventil ermöglicht den Zugang zur Raumluft bei reduziertem Druck.

Ein um 360° bewegbares Winkelstück mit Anti-Asphyxie Ventil für mehr Flexibilität.

D-2302-2011

Individuelle Anpassung (Formbarkeit) der NovaStar® TS NIV-Gesichtsmaske (SE und AAV)



MT-5058-2008

NovaStar® TS NIV-Gesichtsmaske



MT-5051-2008

Bewegliches und biegsames Stirn - polster, die Maske bleibt in Position.



MT-5057-2008

Formbarer und biegsamer Masken - körper zur individuellen Anpassung. Die Maske bleibt in Position.

BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Verpackung	Bestellnummer
NovaStar TS AAV, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung, Größe S	1 Stück	MP01576
NovaStar TS AAV, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung, Größe M	1 Stück	MP01577
NovaStar TS AAV, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung, Größe L	1 Stück	MP01578
Kopfband für NovaStar TS NIV-Maske mit AAV	1 Stück	MP01584
NovaStar TS SE, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung, Größe S	1 Stück	MP01579
NovaStar TS SE, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung, Größe M	1 Stück	MP01580
NovaStar TS SE, Gesichtsmaske zur nicht-invasiven Beatmung, Größe L	1 Stück	MP01581
Kopfband für NovaStar TS NIV-Maske mit SE	1 Stück	MP01583
Größenschablone für NovaStar TS (AAV und SE) Gesichtsmasken zur nicht-invasiven Beatmung	3 Stück	MP01591
Magnetische Clips für NovaStar TS (AAV und SE) Kopfbänder	4 Stück	MP01585

**HAUPTSITZ**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

DEUTSCHLAND

Dräger Medical Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel +49 180 52 41 318*
Fax +49 451 88 27 20 02
dsc@draeger.com
* Inland: EUR 0,14/min

ÖSTERREICH

Dräger Medical Austria GmbH
Perfektastrasse 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04
Fax +43 1 699 38 01
info-austria@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Medical Schweiz AG
Waldeggstrasse 38
3097 Liebfeld-Bern
Tel +41 31 978 74 74
Fax +41 31 978 74 01
info.ch.md@draeger.com

Hersteller:

Dräger Medical GmbH
23542 Lübeck, Deutschland
Das Qualitätsmanagementsystem
der Dräger Medical GmbH
ist zertifiziert nach den Normen
ISO 13485, ISO 9001 und nach
Anhang II.3 der Richtlinie
93/42/EWG (Medizinprodukte).